

LOTION AVEC APPLICATEUR

DOCTEUR POUX



PUISSANCE 5®

TRAITEMENT — ÉLIMINE 100 % POUX & LENTES

DISPOSITIF MÉDICAL

Lire attentivement la notice avant utilisation. Contenance : 100 ml.

La lotion anti-poux et lentes **PUISSANCE 5®** est formulée à base d'ingrédients **100 % d'origine naturelle**, sans silicone, sans insecticide chimique, sans parfum et sans conservateur. Elle agit **mécaniquement** sur les poux et les lentes, en évitant tout risque de résistance : ils sont éliminés par asphyxie. 100 % des poux et des lentes sont éliminés en 5 minutes, en une seule application. La lotion est indiquée chez les enfants **dès 6 mois**, ainsi que chez les femmes enceintes et allaitantes. Son embout canulé permet une application précise.

1

ÉLIMINE 100% POUX & LENTES

2

EFFICACE EN 5 MINUTES

3

UNE SEULE APPLICATION

4

SANS PEIGNAGE

5

CONVIENT DÈS 6 MOIS

RESPECTE LES CHEVEUX & L'ENVIRONNEMENT

CONSEILS D'UTILISATION

Placer une serviette sur les épaules et autour du cou pour éviter que le produit n'entre en contact avec la peau et les vêtements.

- 1 Appliquer sur cheveux secs.
- 2 Couvrir l'ensemble du cuir chevelu en massant de manière à recouvrir tous les poux et lentes.
- 3 Insister derrière les oreilles et au niveau du cou.
- 4 Laisser agir pendant 5 minutes.
- 5 Faire un shampoing à l'issue du traitement pour éliminer le produit, les poux et les lentes morts.

COMPOSITION

Acides gras estérifiés, complexe CLA®, tocophérol.

SANS SILICONE

SANS INSECTICIDE

SANS ALLERGÈNE

SANS PARFUM

SANS CONSERVATEUR

CONSERVATION

- Conserver à température ambiante, à l'abri de la chaleur, du froid et de la lumière.
- Bien refermer après utilisation.
- Ne pas utiliser au-delà d'1 mois après ouverture.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Usage externe uniquement (sur les cheveux et le cuir chevelu).
- Ne pas avaler. En cas d'ingestion, ne pas faire vomir ; consulter immédiatement un médecin et lui montrer la composition.
- Éviter le contact avec les yeux et les muqueuses. En cas de contact, rincer abondamment à l'eau claire.
- Convient aux enfants dès 6 mois, aux femmes enceintes et allaitantes.
- Tester le produit sur le pli du coude, derrière l'oreille et/ou le cuir chevelu avant application.
- Arrêter le traitement en cas d'irritation ou de réaction allergique cutanée. Si les symptômes persistent, consulter un médecin ou un pharmacien et lui montrer l'étiquetage du produit.
- Tenir hors de la portée et de la vue des enfants. Maintenir une surveillance constante durant le traitement de l'enfant.
- Ne pas utiliser après la date de péremption inscrite sous le flacon, ni si le flacon est endommagé.
- L'embout de la canule est un petit objet susceptible d'être porté à la bouche ou introduit dans la cavité nasale par un jeune enfant : risque d'étouffement.

CONTRE-INDICATIONS

- Allergie connue à l'un des ingrédients.
- Ne pas appliquer sur peau lésée ou irritée.
- Cuir chevelu présentant une pathologie (psoriasis, lichen, dermite séborrhéique, etc.) sans avis médical.
- En association avec un autre traitement du cuir chevelu sans avis médical.
- Enfants de moins de 6 mois.

FABRICANT

TAG Lifecare

17 chemin de Charlemagne
40120 Cellettes, France

DISTRIBUTEUR

LFP LAB

33 rue Erlanger, 75016 Paris
www.drpx.com

RÉFÉRENCES

Réf. **LFP62301**

UDI-DI : (01)03701729100475
Made in France



DISPOSITIF MÉDICAL — Classe I MADE IN FRANCE

Tout incident grave survenu en lien avec ce dispositif doit être signalé à TAG Lifecare ainsi qu'à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel l'utilisateur est établi. Le personnage illustré est un personnage de fiction et ne représente pas un professionnel de santé.



RETROUVEZ NOS
CONSEILS SUR
WWW.DRPOUX.COM

SHAMPOOING TRAITANT

DOCTEUR POUX

ÉLIMINE 100 % POUX & LENTES

15
MIN

PUISSANCE 5®

DISPOSITIF MÉDICAL

Lire attentivement la notice avant utilisation. Contenance : 100 ml.

Le shampoing traitant anti-poux et lentes **PUISSANCE 5®** est **100 % efficace sur les poux dès 15 minutes** et sur les lentes dès 45 minutes.* Formulé à base d'huile de coco, parfum tilleul, sans insecticide et sans silicone, il offre une formule douce pour le cuir chevelu, facilite le démêlage et le passage du peigne. Convient **dès 3 ans**.

*Au bout de 15 min, les poux sont sonnés (comateux) et peuvent être retirés à l'aide du peigne fin.

1

EFFICACE SUR POUX DÈS 15 MIN*

2

UNE SEULE APPLICATION

3

CONVIENT DÈS 3 ANS

4

AIDE À DÉCOLLER LES LENTES

5

FACILITE LE PEIGNAGE

RESPECTE LES CHEVEUX & L'ENVIRONNEMENT

MODE D'EMPLOI

- 1 Appliquer le shampoing sur cheveux humides et homogénéiser en massant le cuir chevelu pendant 5 minutes. Bien répartir le produit sur l'ensemble de la chevelure afin de bien enrober les poux et les lentes.
- 2 Laisser poser 15 minutes (efficace sur les poux) jusqu'à 45 minutes (efficace sur les poux et les lentes).
- 3 Passer le peigne fin pour éliminer les poux et lentes morts encore présents dans les cheveux.
- 4 Rincer soigneusement et abondamment les cheveux. Pour une efficacité maximale, l'action peut être répétée au bout de 3 jours.

COMPOSITION

INCI : Aqua (Water), Coconut Acid, Sodium Laureth Sulfate, Cocamidopropyl Betaine, Sodium Chloride, Phenoxyethanol, Citric Acid, Tocopheryl Acetate, Linden Fragrance.

À base d'huile de coco · Parfum tilleul · Formule douce pour le cuir chevelu.

SANS SILICONE

SANS INSECTICIDE

SANS ALCOOL

CONSERVATION

- Conserver à température ambiante, à l'abri de la chaleur, du froid et de la lumière.
- Bien refermer après utilisation.
- À utiliser dans les 30 jours suivant l'ouverture du flacon.
- Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Usage externe uniquement (sur les cheveux et le cuir chevelu).
- Contient des allergènes (Cyclamen Aldehyde, Cyclopentadecanolide, Linalyl Acetate, Geranyl Acetate, Isoeugenyl Acetate et Juniperus Virginiana Oil) pouvant provoquer une réaction allergique cutanée.
- Tester le produit dans le pli du coude, derrière l'oreille et/ou sur le cuir chevelu avant application.
- Ne pas laisser le produit sur les cheveux plus de 45 minutes.
- Convient aux enfants dès 3 ans. Pour les femmes enceintes ou allaitantes, demander l'avis d'un médecin avant utilisation.
- Un risque d'allergie ou de sensibilisation reste toujours possible : arrêter le traitement en cas d'irritation ou de tout autre signe d'hypersensibilité. Si les symptômes persistent, consulter un médecin ou un pharmacien et lui montrer l'étiquetage du produit.
- Éviter tout contact avec les yeux et les muqueuses. En cas de contact, rincer abondamment à l'eau claire.
- Ne pas avaler. En cas d'ingestion, ne pas faire vomir ; consulter immédiatement un médecin et lui montrer la liste des ingrédients.
- Tenir hors de la portée et de la vue des enfants. Maintenir une surveillance constante durant le traitement de l'enfant.
- Ne pas utiliser après la date de péremption inscrite sous le flacon.

CONTRE-INDICATIONS

- Ne pas appliquer sur peau lésée ou irritée (psoriasis, lichen, dermite séborrhéique ou autre pathologie du cuir chevelu) sans avis médical.
- En association avec un autre traitement du cuir chevelu sans avis médical.
- Allergie connue à l'un des ingrédients.
- Enfants de moins de 3 ans.

FABRICANT
TAG Lifecare

17 chemin de Charlemagne
40120 Cellettes, France

DISTRIBUTEUR
LFP LAB

33 rue Erlanger, 75016 Paris
www.drpx.com

RÉFÉRENCES
Réf. LFP62303

UDI-DI : (01)03701437100499
Made in France



DISPOSITIF MÉDICAL Classe 1 MADE IN FRANCE

Tout incident grave survenu en lien avec ce dispositif doit être signalé à TAG Lifecare ainsi qu'à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel l'utilisateur est établi. DOCTEUR POUX est un personnage généré à l'aide de l'IA. Il ne représente pas un professionnel de santé.



RETROUVEZ NOS
CONSEILS SUR
WWW.DRPOUX.COM

PEIGNE ANTI-POUX & LENTES

DOCTEUR
POUX



LOUPE INTÉGRÉE

DENTS EN ACIER INOXYDABLE — LOUPE INTÉGRÉE

DISPOSITIF MÉDICAL

Peigne à dents en acier inoxydable avec loupe intégrée. Lire attentivement la notice avant utilisation.

Le peigne **DOCTEUR POUX** est un dispositif médical qui permet de retirer **mécaniquement** les poux et les lentes grâce à ses dents en **acier inoxydable micro-cannelées**, qui capturent efficacement les parasites tout en respectant les cheveux et le cuir chevelu. Ses **pointes arrondies** assurent un passage doux et **indolore**, même sur les cuirs chevelus sensibles. La **loupe intégrée** facilite l'identification des poux et des lentes lors du contrôle de la chevelure.

✓
ACIER INOXYDABLE

✓
DENTS MICRO-CANNELÉES

✓
POINTES ARRONDIES

✓
LOUPE INTÉGRÉE

✓
PASSAGE INDOLORE

DENTS MICRO-CANNELÉES À POINTES ARRONDIES · TRAITEMENT INDOLORE

MODE D'EMPLOI

- 1 Démêler les cheveux propres et humides avec un peigne classique.
- 2 Séparer la chevelure en mèches fines (3 à 5 cm).
- 3 Passer le peigne anti-poux DOCTEUR POUX de la racine vers les pointes.
- 4 Essuyer le peigne après chaque passage pour retirer poux et lentes.
- 5 Répéter l'opération sur toute la chevelure.

Pour une efficacité optimale, utiliser le peigne en complément d'un traitement anti-poux DOCTEUR POUX (lotion, shampooing et bonnet).

NETTOYAGE

Après chaque utilisation :

- Nettoyer le peigne à l'eau tiède savonneuse.
- Rincer puis sécher soigneusement.
- Ne pas faire bouillir.

PRÉCAUTIONS

- Vérifier que le peigne n'est pas endommagé avant utilisation.
- Ne pas utiliser sur un cuir chevelu irrité ou blessé.
- Tenir hors de portée des jeunes enfants.

FABRICANT

Yuyao Safe & Beauty Lice Comb Factory
Xinxin Village, Longxia Street
315480 Zhejiang, Chine

MANDATAIRE UE

MedPath GmbH
Mies-van-der-Rohe-Strasse 8
80807 Munich, Allemagne

DISTRIBUTEUR

LFP LAB
33 rue Erlanger, 75016 Paris
www.drpx.com

RÉF.

LFP62305
Made in China



DISPOSITIF MÉDICAL Classe 1

Tout incident grave survenu en lien avec ce dispositif doit être signalé au fabricant ainsi qu'à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel l'utilisateur est établi. DOCTEUR POUX est un personnage généré à l'aide de l'IA. Il ne représente pas un professionnel de santé.



RETROUVEZ NOS
CONSEILS SUR
WWW.DRPOUX.COM